

## Kaip naudotis kapiliarinio kraujo paėmimo rinkiniu

1.



Apie minutę plaukite rankas šiltu vandeniu su muilu. Jei rankos vėsios – palaikykite kelias minutes šiltame vandenyje, kad sušiltų – taip lengviau bus surinkti kraują mėginiui. Įsitinkinkite, kad rankas tinkamai išdžiovinate.

2.


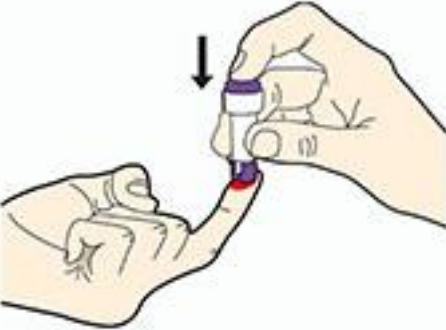






Išimkite kraujo mėgintuvėlį iš apsauginės pakuotės. Nuimkite dangtelį nuo mėgintuvėlio. Pastatykite mėgintuvėlį.



3.



Nuvalykite bevardžio piršto galiuką alkoholiu suvilgyta servetėle ir leiskite išdžiūti.

4.		<p>Pasukite ir nuimkite antgalį nuo lanceto – tada antgalį išmeskite.</p>
5.		<p>Lanceto galiuką <b>tvirtai</b> priglauskite prie piršto galo ir nuspauskite viršuje esantį mygtuką. Taip pradursite pirštą.</p>
6.		<p>Atsistokite, laikykite ranką tiesiai ir švelniai masažuokite kitais pirštais, kad kraujas tekėtų į mėgintuvėlį.</p>

7.		<p>Tęskite, kol buteliukas bus užpildytas iki viršutinės juostelės. Jei nesurenkate pakankamai kraujo naudokite kitą lancetą ant kito piršto.</p>
8.		<p>Nuvalykite pirštą servetėle ir užklijuokite pleistriuką.</p>
9.		<p>Tvirtai užspauskite dangtelį ant buteliuko ir 5-10 kartų lėtai apverskite mėgintuvėlį, kad susimaišytų kraujas.</p>

10.		<p>Įdėkite kraujo mėginį atgal į apsauginį dėklą.</p>
11.		<p>Įdėkite visus mėginius į maišelį ir sandariai uždarykite. Įdėkite atgal į dėžutę. Išneškite nedelsdami į paštomatą ir išsiųskite.</p>

**P.s. atliekant bendrą kraujo tyrimą bus naudojamas mėgintuvėlis su kapiliaru.**





Viską reikia atlikti taip pat, išskyrus, kad kraujas nėra lašinamas, o surenkamas liečiant kapiliarinio kraujo surinkimo sistemą prie išsiskyrusio kraujo.



Kapiliariniam kraujui leidžiama lengvai telėti į sistemą.



Paėmus reikiamą kraujo kiekį kapiliarą būtina uždaryti.



10 kartų apverskite mėgintuvėlį, kad susimaišytų kraujas.  
**Toliau atlikti visus veiksmus nuo 10 punkto kaip ir su seruminiu mėgintuvėliu.**